

## Alet Tanımlama (Renk) Bandı Kullanma (Uygulama) Talimatı

Alet tanımlama bantlarımız aşağıdaki kullanma (uygulama) talimatına uyulması halinde Buhar, Flaş Buhar, ve Etilen oksit sterilizasyon metotlarında sterilizasyon etkisini engellememe ve aletler üzerinde kalıcılığı konusunda test edilmiştir.

- Öncelikle temiz, kullanılmamış temiz bir eldiven giyiniz
- Aleti temizleyin ve kurulayın üzerinde herhangi bir yağ, kir veya alet sütü vb. bir kalıntı kalmamalıdır
- Öncelikle eldiveninizi ve sonra bantın yapıştırılacağı yüzeyi hav tüy bırakmayan alkollü bez ile temizleyin ve alkolün kurumasını bekleyin
- Bandı sayfadan pudrasız temiz bir eldiven ve mümkünse ucu yukarda anlatıldığı gibi temizlenmiş ve alkolle muamele edilmiş bir cımbız ile çıkartın, bandın boyu uzun ise kısaltın
- Bandı alete yapıştırırken ASLA çektirerek (sündürerek) sarmayın
- Bant aletin üzerinde 1,5 kat sarılarak yapıştırılmalı ama iki kereden fazla tur attırılmamalıdır,
- **Aleti kullanmadan önce buhar otoklavında sterilizasyona tabii tutun, sterilizasyondan sonra bant alette kalıcı hale gelecektir**
- Kullanım şekline bağlı olarak uzun bir süre kullanımdan sonra bantta çentik, pullanma kenarından açılma görüldüğünde hemen değiştirilmelidir

### Önceki veya eskiyen bandı yenisi ile değiştirmek gerektiğinde aşağıdaki talimatı uygulayın:

- Aletin üzerindeki banda bir kaç defa, cerrahi aletlere zarar vermeyen özel tasarlanmış olan yapışkan çıkartıcı püskürtün
- Bandın parmaklarınızla çıkartabileceğiniz duruma gelinceye kadar yumuşamasını bekleyin,
- Eğer halen yumuşamamışsa (eğer çok kurumuş ise bu yüksek sıcaklıktaki sterilizasyon çevrimlerinden kaynaklanabilir) aletin büyüklüğüne uygun bir tasa solüsyonu dökün ve aleti tamamen içine batacak şekilde bir müddet daha bekletin.
- Yumuşadığında bandı elinizle çıkartın.
- Hav ve tüy bırakmayan nemli bir bezle silin,
- Yeni bandı yapıştırmadan önce sayfa başındaki talimatları uygulayın.

### Önemli Not:

Bandı çıkarmak için bıçak gibi keskin aletler kullanmayın ve/veya kazımayın. Bu aletlerinizin yüzeyindeki paslanmaya karşı kaplanmış gözle görülmeyen katmanı bozar ve aletlerinizin paslanmasını, karıncalanmasını hızlandırır.